



Форма выпуска

Прозрачный водный раствор голубого цвета готовый к применению, дезинфицирующее средство

Состав

содержит глутаровый альдегид-1%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид -0,5%, а также функциональные добавки и краситель.

Упаковка

полиэтиленовая канистра вместимостью 3 л

Фармакологическое действие

Препарат АДС-521 обладает бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) и вирулицидной активностью.

Показания

Дезинфицирующее средство АДС-521 предназначено для дезинфекции стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок из разных материалов, коррозионностойких артикуляторов и слепочных ложек.



Способ применения и дозы

Оттиски, зубопротезные заготовки предварительно отмывают водой, соблюдая при этом средства индивидуальной защиты (резиновый фартук, перчатки), затем дезинфицируют путем их погружения в неразбавленный раствор АДС-521 на 10 минут. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают путем погружения в емкость с водой в течение 5 мин.

Особые указания

Дезинфицирующее средство АДС-521 может быть использовано в течение суток многократно. При изменении внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение, появление хлопьев и т.п.) его следует заменить.

Условия хранения

- в невскрытой упаковке при температуре от 0°C до +30°C, вдали от источников возгорания и нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

Срок годности

1 год в невскрытой упаковке производителя; во вскрытой упаковке — не менее двух месяцев — до изменения внешнего вида.

По вопросам приобретения Раствор АДС-521 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов