



## Карбодент

### Показания для применения:

- пломбирование кариозных полостей различных групп постоянных зубов;
- изготовление вкладок;
- одноэтапное изготовление пластмассовых коронок и штифтовых зубов;

### Преимущества:

- низкое водопоглощение;
- обладает хорошей пластичностью;
- пломбы хорошо обрабатываются и полируются;

### Инструкция по применению:

- соотношение порошка и жидкости 2:1 соответственно;
- тщательно смешивают порошок и жидкость;
- материал вносят в кариозную полость 1-2 порциями;
- время отверждения 5-7 мин.;
- номера цветов соответствуют расцветке единой стоматологической;

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется применять прокладки, содержащие эвгенол и фенол.**

### Техническая консультация

**Комплектность:**

Порошок: цвет №0	10 г (1 флакон)
цвет №6	10 г (1 флакон)
цвет №10	10 г (1 флакон)
цвет №12	10 г (1 флакон)
цвет №16	10 г (1 флакон)
цвет №19	10 г (1 флакон)
Жидкость	25 мл (2 флакона)
Пробка — капельница	2 шт.
Шпатели	50 шт.
Ступка стоматологическая	1 шт.
Инструкция по применению	

**Акрилоксид****Показания для применения:**

- пломбирование любых кариозных полостей различных групп постоянных зубов;
- восстановление углов передних зубов;
- одноэтапное изготовление пластмассовых коронок и штифтовых зубов;
- восстановление пластмассовой коронки, штифтового зуба и стертой поверхности облицовки комбинированной коронки;

**Преимущества:**

- не имеет «песочной стадии»;
- обладает хорошей пластичностью;
- пломбы легко обрабатываются и полируются;

**Инструкция по применению:**

- поверхность коронки, штифтового зуба и фасетки, подлежащую восстановлению, предварительно обработать абразивом и смочить жидкостью;
- соотношение порошка и жидкости 2:1 соответственно;
- масса сохраняет пластичность 1,5-2 мин.;
- время отверждения 8-10 мин.;
- полировку производят абразивным инструментом после полного отверждения;
- номера цветов соответствуют расцветке единой стоматологической;

**Техническая консультация****Комплектность:**

Порошок: цвет №10 цвет №12 цвет №16	20 г (1 флакон) 20 г (1 флакон) 20 г (1 флакон)
Жидкость	25 мл (2 флакона)
Мерник для порошка	1 шт.
Пробка — капельница	2 шт.
Инструкция по применению	

**Дентин — паста****Показания для применения:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- для покрытия лечебной прокладки (контрольная пломба) в кариозных полостях;
- для временных пломб;

#### **Преимущества:**

- хорошая адгезия к дентину зуба;

#### **Инструкция по применению:**

- паста накладывается в заранее подготовленную и высушенную кариозную полость;
- после взятия пасты для наложения пломбы баночку необходимо закрыть для предотвращения попадания влаги;

#### **Комплектность:**

- дентин-паста 50 г - 1 банка;
- банки упаковываются по 10 шт. в картонные коробки с инструкциями по применению;

#### **Дентин для повязок**

#### **Показания для применения:**

- в качестве повязок для укрепления и покрытия лекарственных веществ в кариозной полости зуба;
- для временных пломб;

#### **Преимущества:**

- хорошая адгезия к дентину зуба;
- достаточная прочность;
- время замешивания 1-2 мин.;
- время затвердевания 2-3 мин.;



**Инструкция по применению:**

- для замедления времени затвердевания дентина к воде следует прибавить одну каплю глицерина на две капли воды или небольшое количество буры;

Техническая консультация

**Комплектность:**

Порошок	200 г (1 банка)
Инструкция по применению	

По вопросам приобретения **пломбировочных материалов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;