



Лак разделительный ИЗОКОЛ — 69

Показания для применения:

- изоляция поверхности гипсовой формы с целью предотвращения срачивания гипса с акриловыми пластмассами;

Преимущества:

- удобство в применении;
- оптимальная вязкость, обеспечивающая высокое качество пленки;
- не изменяет поверхность модели;
- высокие изолирующие свойства;

Инструкция по применению:

- с поверхности гипса необходимо удалить воск;
- модель (форма) должна быть обезжирена кипячением в воде;
- нельзя опускать кисточку во флакон с «Изоколом-69»;
- неиспользованный «Изокол-69» нельзя сливать во флакон;
- время образования пленки 1-5 мин.;

Техническая консультация

Комплектность:

Жидкость	150 мл (1 флакон)
----------	-------------------



Инструкция по применению

Лак покрывной ЭДА — 03

Показания для применения:

- покрытие поверхностей металлических конструкций несъемных зубных протезов перед облицовкой их пластмассой;

Преимущества:

- исключает просвечивание металла через облицовочную пластмассу;
- позволяет получить высокие косметические свойства металлопластмассовых протезов;
- порошки лака окрашены в пять цветов;

Инструкция по применению:

- соотношение порошка и жидкости 1:1 соответственно;
- поверхности металлического каркаса, покрываемые лаком, тщательно очищают от окалины и протирают мономером («АКР-7») или этиловым спиртом;
- лак наносят кисточкой тонким слоем и подсушивают на воздухе 15 мин.;
- выдерживают в термощкафу при температуре 120 °С 10 мин.;

Техническая консультация

Комплектность:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Порошок:	
цвет №1	10 г (1 флакон)
цвет №2	10 г (1 флакон)
цвет №3	10 г (1 флакон)
цвет №4	10 г (1 флакон)
цвет №5	10 г (1 флакон)
Жидкость	75 мл (1 флакон)
Инструкция по применению	

Мономер АКР — 7**Показания для применения:**

- обезжиривание искусственных зубов;
- обезжиривание каркасов несъемных протезов;

Инструкция по применению:

- наносится кисточкой или ватным тампоном;
- перед нанесением «Фторлак» поверхность очистить от зубного налета и высушить;

Техническая консультация**Комплектность:**

Жидкость	100 мл или 150 мл
----------	-------------------



Инструкция по применению

Лак покрывной Синма М + V

Показания для применения:

- покрытие поверхностей металлических конструкций несъемных зубных протезов перед облицовкой их акриловой пластмассой;

Преимущества:

- исключает просвечивание металла через облицовочную пластмассу;
- быстрый подбор соответствующего цвета лакового покрытия обеспечивается 4 цветами порошков(грунтов), — А, В, С, D, соответствующих главным оттенкам расцветки «Vita»;
- для усиления интенсивности оттенка к основному порошку добавляют концентраты красителей 5 цветов (белый, желтый, коричневый, серый, розовый);
- розовый концентрат порошка может применяться для покрытия металлических частей конструкций при изготовлении бюгельных протезов;
- высокая адгезия лакового покрытия к металлической конструкции, 6 МПа при выдержке в водной среде при 37 С в течении 24 часов;
- прочное соединение лакового покрытия с облицовочной пластмассой и металлической конструкцией, исключающее растворение лакового покрытия;
- в качестве облицовочной пластмассы рекомендуется применять пластмассу «Синма-М+V» или «Синму-М»;

Комплектность:

- порошок (грунт) цветов А,В,С,D (по 8 г. каждого цвета) – 4 банки;
- жидкость 55 мл – 1 флакон;
- концентраты красителей пяти цветов: белый, желтый, коричневый, серый, розовый, по 4 г каждого цвета – 5 банок;
- пробка-капельница – 1 шт.;
- инструкция по применению;



Предлагается поставка розового концентрата красителя в отдельной упаковке:

- концентрат красителя розового цвета 15 г – 1 банка;
- жидкость 55 мл – 1 флакон;
- пробка-капельница — 1 шт.;
- инструкция по применению;

Стомафикс

Показания для применения:

- фиксация частичных и полных съемных зубных протезов;

Преимущества:

- обеспечивает плотное и надежное прилегание протеза к десне в течении всего дня;
- оказывает успокаивающее действие на болезненные участки слизистой;
- способствует лучшему пережевыванию пищи;
- защищает десна от попадания твердых частиц пищи под протез;
- ношение зубного протеза дает чувство уверенности, комфортности;
- не имеет вкуса и запаха, сохраняя натуральный вкус пищи;
- инструкция по применению;
- протез хорошо промыть и просушить;
- выдавить крем на протез тонкими полосками или точечными каплями , не доходя до краев протеза;
- прополоскать полость рта и плотно прижать его к десне в течении нескольких секунд;
- остатки крема удалить с десны и протеза;

Внимание! Крем «Стомафикс» не рекомендуется применять при плохо подогнанных протезах

Комплектность:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вспомогательные и профилактические материалы

- крем 40г - 1 туба;
- инструкция по применению;