



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО «ПОЛИСЕПТ»

Область применения:

Растворы средства «Полисепт» применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, изделий медицинского назначения однократного применения перед утилизацией, предметов ухода за больными, белья, посуды.

Средство «Полисепт» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов полиомиелита, энтеро-, рота-, аденовирусов, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (тестировано на вирусе полиомиелита 1 типа), грибов рода Кандида и дерматофитов, а также плесневых грибов. На поверхностях, обработанных средством, остается малозаметная пленка, обеспечивающая остаточное антимикробное действие. Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

Описание

Средство «Полисепт» выпускается в двух формах: в виде твердого прозрачного вещества желтого цвета и 25% водного раствора, представляющего собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета (допускается присутствие небольшого количества осадка). Действующим веществом (ДВ) является полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, содержание которого составляет в твердой форме — 100%, в жидкой форме — 25%. Рабочие растворы бесцветны, не имеют запаха.

Рекомендации

Рабочие растворы средства готовят в технической посуде из любого материала.

Средство «Полисепт» в виде твердого вещества медленно растворяется в воде. Время его растворения сокращается при интенсивном перемешивании и использовании теплой (45-55 ° С) воды. С целью ускорения процесса получения рабочего раствора рекомендуется также приготовление 25% водного раствора (250 г средства на 750 мл питьевой воды), который перед последующим разведением перемешивают. Подробнее – инструкция компании-производителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Срок годности средства в виде твердого вещества в герметично закрытой заводской упаковке и в виде 25% раствора составляет 3 года. Рабочие растворы средства сохраняют антимикробную активность в течение 2 месяцев.

По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 средство «Полисепт» относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Кожно-резорбтивные и кумулятивные свойства не выявлены. Сенсибилизирующие свойства выявлены слабо. При повторном контакте с кожей рабочих растворов средства возможно раздражающее действие. Вследствие низкой летучести средство малоопасно при ингаляционном воздействии.

ПДК полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в воздухе рабочей зоны — 2 мг/м³ (аэрозоль), 3 класс опасности.

Упаковка

«Полисепт» в виде твердого вещества поставляется в двойных полиэтиленовых пакетах по 1,0 и 5,0 кг.

25% водный раствор поставляется в полиэтиленовых емкостях вместимостью 1; 5; 10; 20; 40 л.

По вопросам приобретения **полисепта** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру: